

Avant la première utilisation, il est conseillé de nettoyer Inhal'Air® à l'eau claire (recommandation nettoyage dans la notice page 8) • Agiter l'aérosol-doseur puis ôter le capuchon. Introduire l'embout buccal de l'aérosol-doseur dans l'adaptateur arrière de Inhal'Air®

Utilisation avec masque :

placer le masque de Inhal'Air® sur la bouche et le nez et appuyer doucement pour une bonne adhérence du masque sur le visage. Appuyer sur l'aérosol-doseur pour libérer une dose de médicament et maintenir le masque sur le visage tout en respirant pendant environ 30 secondes dans la chambre d'inhalation. Puis ôter le masque du visage. Utilisation sans masque : placer l'embout buccal dans la bouche , appuyer sur l'aérosol-doseur pour libérer une dose de médicament et respirer pendant environ 30 secondes.